


2020-11-6

麦吉 V1 英德 1 片(OPP塑料袋)

26X19cm

内容印刷尺寸: 100\*150mm ■■■■■ C100 M50 Y0 K0

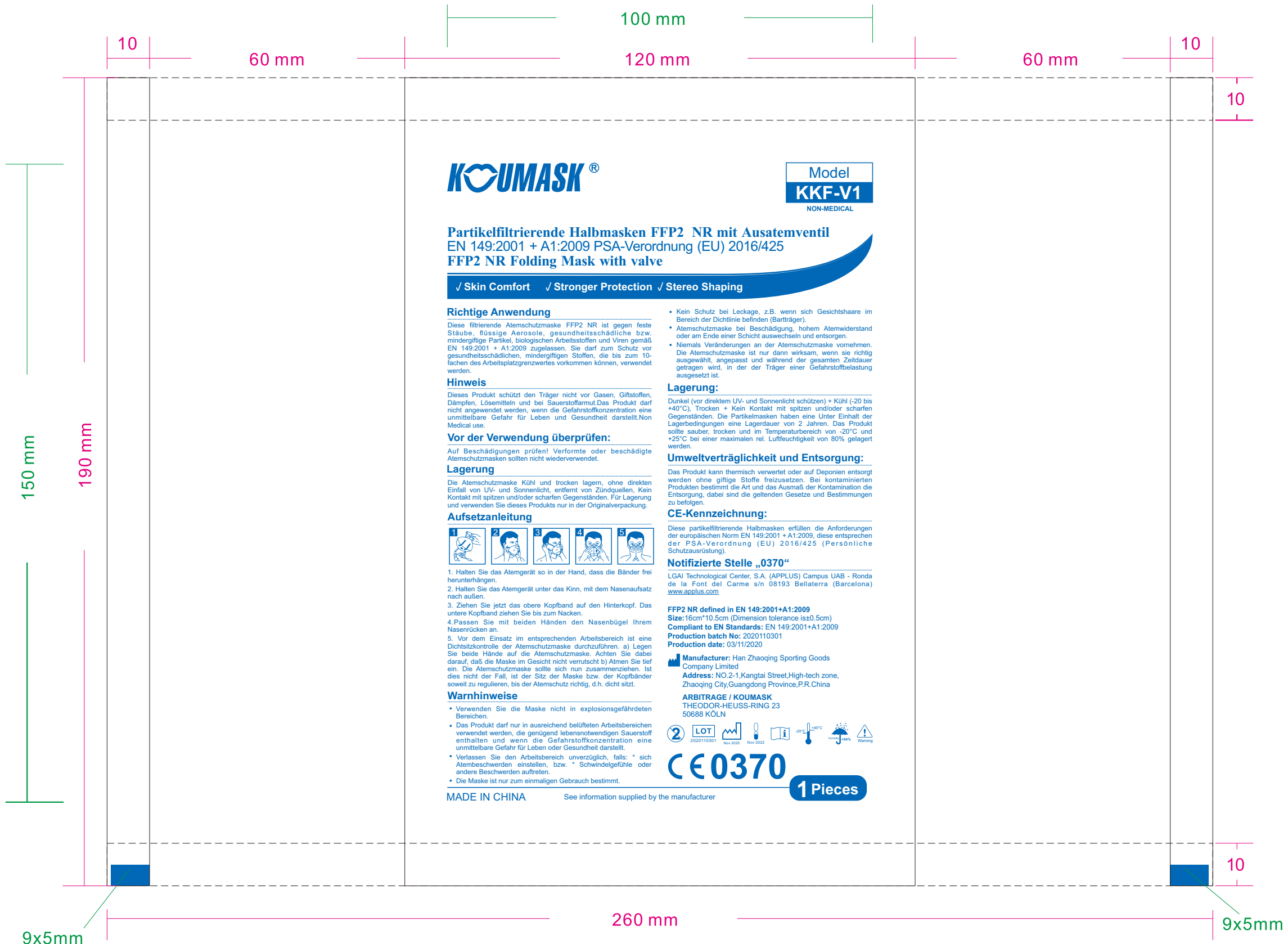

**KOUMASK®**

Model  
**KKF-V1**  
NON-MEDICAL

**Partikelfiltrierende Halbmasken FFP2 NR mit Ausatemventil**  
EN 149:2001 + A1:2009 PSA-Verordnung (EU) 2016/425  
**FFP2 NR Folding Mask with valve**

✓ Skin Comfort ✓ Stronger Protection ✓ Stereo Shaping

#### Richtige Anwendung

Diese filtrierende Atemschutzmaske FFP2 NR ist gegen feste Stäube, flüssige Aerosole, gesundheitsschädliche bzw. milderigefuge Partikel, biologischen Arbeitsstoffen und Viren gemäß EN 149:2001 + A1:2009 zugelassen. Sie darf zum Schutz vor gesundheitsschädlichen, milderigefugen Stoffen, die bis zum 10-fachen des Arbeitsplatzgrenzwertes vorkommen können, verwendet werden.

#### Hinweis

Dieses Produkt schützt den Träger nicht vor Gasen, Giftstoffen, Dämpfen, Lösemitteln und bei Sauerstoffarmut. Das Produkt darf nicht angewendet werden, wenn die Gefahrstoffkonzentration eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit darstellt. Non Medical use.

#### Vor der Verwendung überprüfen:

Auf Beschädigungen prüfen! Verformte oder beschädigte Atemschutzmasken sollten nicht wiederverwendet.

#### Lagerung

Die Atemschutzmaske kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von UV- und Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, Kein Kontakt mit spitzen und/oder scharfen Gegenständen. Für Lagerung und verwenden Sie dieses Produkts nur in der Originalverpackung.

#### Aufsetzanleitung



1. Halten Sie das Atemgerät so in der Hand, dass die Bänder frei herunterhängen.
2. Halten Sie das Atemgerät unter das Kinn, mit dem Nasenaufsatz nach außen.
3. Ziehen Sie jetzt das obere Kopfband auf den Hinterkopf. Das untere Kopfband ziehen Sie bis zum Nacken.
4. Passen Sie mit beiden Händen den Nasenbügel Ihrem Nasenrücken an.
5. Vor dem Einsatz im entsprechenden Arbeitsbereich ist eine Dichtsitzzkontrolle der Atemschutzmaske durchzuführen. a) Legen Sie beide Hände auf die Atemschutzmaske. Achten Sie dabei darauf, daß die Maske im Gesicht nicht verrückt b) Atmen Sie tief ein. Die Atemschutzmaske sollte sich nun zusammenziehen. Ist dies nicht der Fall, ist der Sitz der Maske bzw. der Kopfbänder soweit zu regulieren, bis der Atemschutz richtig, d.h. dicht sitzt.

#### Warnhinweise

- Verwenden Sie die Maske nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Das Produkt darf nur in ausreichend belüfteten Arbeitsbereichen verwendet werden, die genügend lebensnotwendigen Sauerstoff enthalten und wenn die Gefahrstoffkonzentration eine unmittelbare Gefahr für Leben oder Gesundheit darstellt.
- Verlassen Sie den Arbeitsbereich unverzüglich, falls: \* sich Atembeschwerden einstellen, bzw. \* Schwindelgefühle oder andere Beschwerden auftreten.
- Die Maske ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

- Kein Schutz bei Leckage, z.B. wenn sich Gesichtshaare im Bereich der Dichtlinie befinden (Bariträger).
- Atemschutzmaske bei Beschädigung, hohem Atemwiderstand oder am Ende einer Schicht auswechseln und entsorgen.
- Niemals Veränderungen an der Atemschutzmaske vornehmen. Die Atemschutzmaske ist nur dann wirksam, wenn sie richtig ausgewählt, angepasst und während der gesamten Zeitdauer getragen wird, in der der Träger einer Gefahrstoffbelastung ausgesetzt ist.

#### Lagerung:

Dunkel (vor direktem UV- und Sonnenlicht schützen) + kühl (-20 bis +40°C), Trocken + Kein Kontakt mit spitzen und/oder scharfen Gegenständen. Die Partikelmasken haben eine Unter Einhalt der Lagerbedingungen eine Lagerdauer von 2 Jahren. Das Produkt sollte sauber, trocken und im Temperaturbereich von -20°C und +25°C bei einer maximalen rel. Luftfeuchtigkeit von 80% gelagert werden.

#### Umweltverträglichkeit und Entsorgung:

Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen. Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu befolgen.

#### CE-Kennzeichnung:

Diese partikelfiltrierende Halbmasken erfüllen die Anforderungen der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009, diese entsprechen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstung).

#### Notifizierte Stelle „0370“

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra (Barcelona) [www.applus.com](http://www.applus.com)

**FFP2 NR defined in EN 149:2001+A1:2009**  
**Size:** 16cm\*10.5cm (Dimension tolerance is±0.5cm)  
**Compliant to EN Standards:** EN 149:2001+A1:2009  
**Production batch No:** 2020110301  
**Production date:** 03/11/2020

**Manufacturer:** Han Zhaoqing Sporting Goods Company Limited  
**Address:** NO.2-1, Kangtai Street, High-tech zone, Zhaoqing City, Guangdong Province, P.R. China

**ARBITRAGE / KOUMASK**  
THEODOR-HEUSS-RING 23  
50688 KÖLN



**CE 0370**

**1 Pieces**

MADE IN CHINA

See information supplied by the manufacturer

260 mm

9x5mm

9x5mm